



**КОРЕКТОР
ПОСТАВИ (РЕКЛІНАТОР)
ЕЛАСТИЧНИЙ
З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ**



Еластичні
вироби



Mod. 401

КОРЕКТОР ПОСТАВИ (РЕКЛІНАТОР) ЕЛАСТИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ

 (Українське виробництво)

Коректор постави еластичний з ребрами жорсткості забезпечує помірну реклинацію з розведенням плечового поясу і розвантаження грудного відділу хребта при збереженні нормального тону м'язів. Виконує активну корекцію сутулості, кіфозу, початкових сколіотичних деформацій. Поєднуючи в собі підтримку, еластичність і комфорт, забезпечує мобільність та безпеку ослабленої спини.

Запечечує фіксуючий та розвантажуючий ефект.

Зберігає мобільність і не виключає роботу м'язів спини.


Оснащений двома металевими ребрами жорсткості.

Призначення:

- порушення постави у дітей і дорослих;
- спонділопатії і остеохондропатії грудного відділу хребта;
- період реабілітації після травм і операцій на грудному відділі хребта;
- підвищене фізичне навантаження, вимушене тривале перебування в статичному положенні;
- середній та пізній періоди реабілітації після травм і операцій на поперековому відділі хребта.

Переваги:


1. Виготовлений з використанням бавовни.
2. Бандаж непомітний під одягом.
3. Роз'ємний, легко одягається та знімається.
4. Розроблено відповідно до рекомендацій лікарів.
5. Зроблено в Україні.

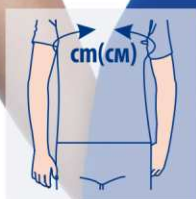

Розмір №	1	2	3	4	5	6	7
Окружність грудей на рівні пахв, ст(см)	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119	120-127	128-135
Код Моріона	551735	551745	551746	551747	551750	551751	551753

Схема надягання:

1. Коректор рекомендовано надягати безпосередньо на спідню білизну.
2. Застібніть коректор на животі за допомогою застібки "липучка".
3. Ребра жорсткості повинні бути розташовані симетрично щодо хребта.
4. Пропустіть реміні коректору під пахвами і перехрестіть їх на спині.
5. При розправлених плечах зафіксуйте еластичні реміні під грудною кліткою.

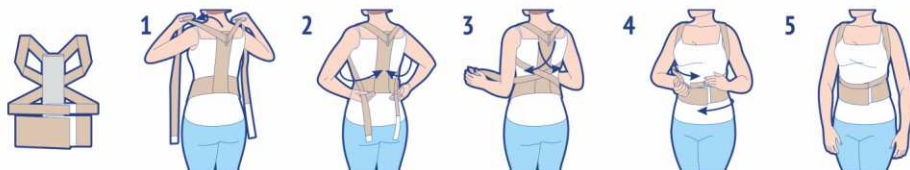

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!